



完全側臥位支援クッション ピタットくん90ワイド

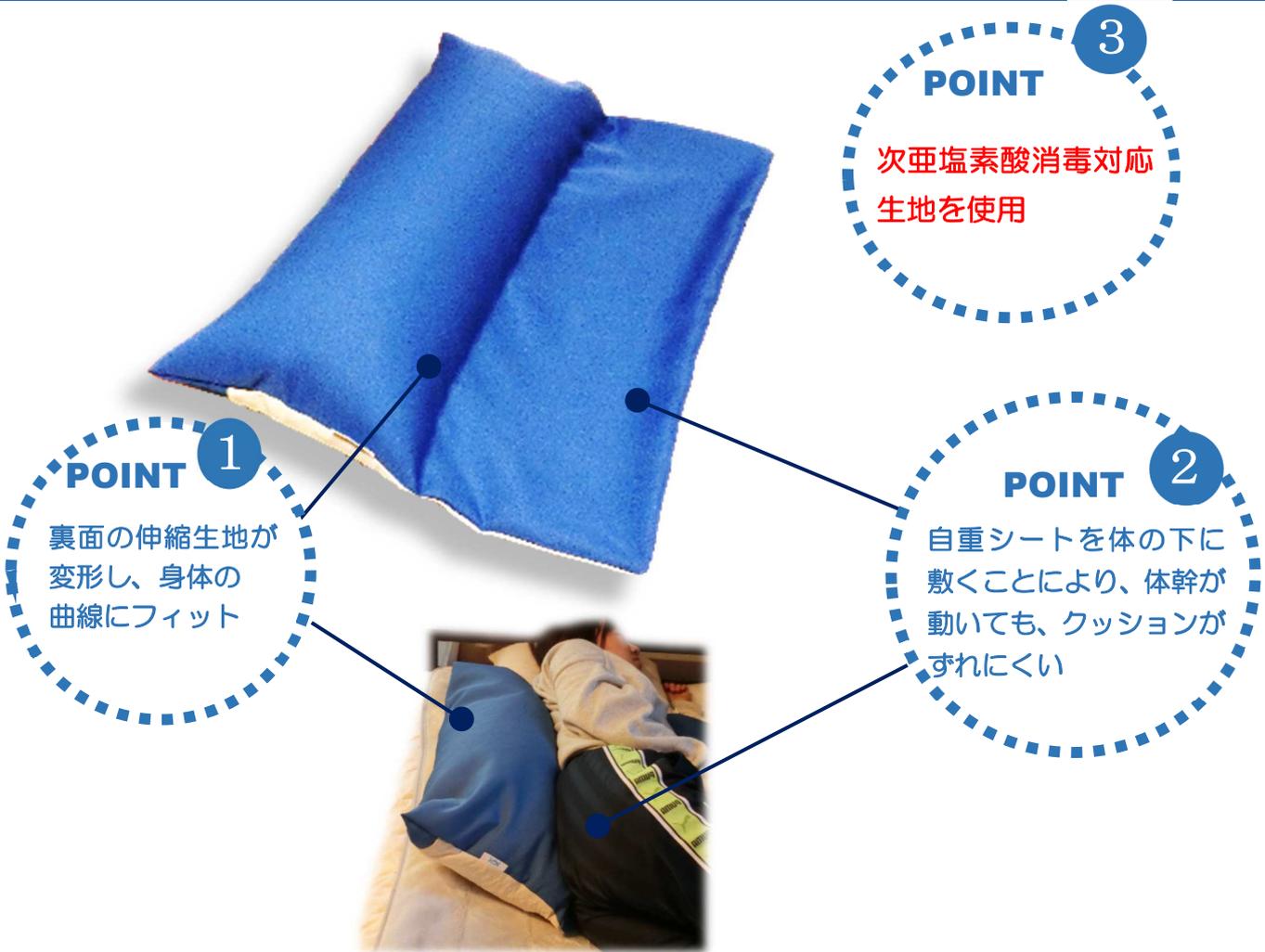


POINT 4 ピタットくん90ワイドは60度側臥位と90度側臥位を支える


60度側臥位

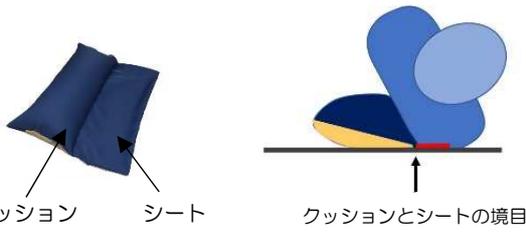

90度側臥位

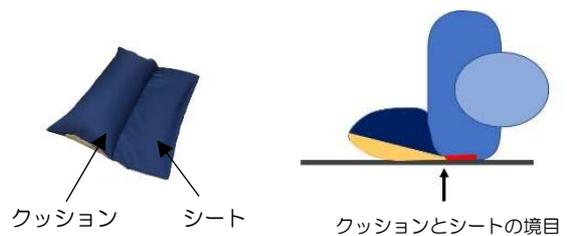

POINT 1 自重シートにより、クッションがずれにくい

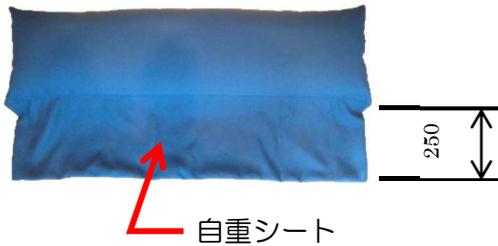

自重シート（幅250mm長さ700mmの生地部分）に体の一部が乗ると体幹が動いても、クッション部分が自重により押さえつけられているため、クッション自体が動きにくくなります。

POINT 2 次亜塩素酸消毒対応生地を使用

- ・唾液、嘔吐、頭髪、薬剤などが生地に付着し、不衛生になった場合、洗濯と消毒ができます。
- ・ピタットくん90ワイドでは、0.1%次亜塩素酸消毒対応の生地・発泡ビーズを使用しています。
- ・洗濯はぬるま湯で、手洗い後、脱水して下さい。乾燥機を避けて（耐熱75度）日陰干しして下さい。

POINT 3 使用方法

自分で身体を動かせる方



自重シートをベッドの中央に置く。



クッションと自重シートの境目が身体にかかるように体を動かす。



自分では身体を動かしにくい方



自重シートを伸縮生地側に折り曲げる。



折り目を背面とベッドの境にセットする。



自重シートとクッションの間に手を入れて、患者の体の下に手とともに自重シートを敷きこむ。

身体が安定するように、自重シート及びクッションを調整する。※2～3時間おきに体位変換される場合は、自重シートの半分を目安に敷きこんでください。シートが取りにくくなりますので。

注意事項

- 本品は可燃性ですので、タバコなど火気の近くでの使用は十分にご注意ください。
- 針やカッターナイフなど、刃物や鋭利な物を本体に使用しないでください。

販売価格

ピタットくん90ワイド 10,000 円（消費税・送料別途）

※製品の仕様・価格は予告なく変更する場合があります。

ピタットくん90ワイド仕様

サイズ(mm)	幅クッション部350/自重シート250×長さ700×高さ150
材質	布帛(ポリエステル100%)、ニット(ポリエステル100%) ビーズクッション(中材:ポリスチレン、ポリエチレン重合体)
重量	約800g